

TILBEHØR

Klokker fra Alexandravisjon leveres i en elegant svart boks.

Denne boksen er spesielt nyttig for å beskytte anhengene når de ikke er i bruk.

Lommeurene leveres med en ring og festeordning slik at også dette uret kan festes i et kjede.

Hvordan ringen festes til lommeuret (Meteor):

- Bruk en liten stjerneskrutrekker
- Fjern den originale skruen på baksiden av Meteor
- Oppbevar denne skruen i den medfølgende plastikkposen slik at den kan brukes senere
- Erstatt den originale skruen med den skruen som er påmontert en ring
- Fest den nye skruen ved å dra til med hånden



REFERANSE



Meteor
blå
ref: AV_ME01



Meteor
svart
ref: AV_ME02



Meteor
rød
ref: AV_ME03



ALEXANDRAVISION



Handy Tech Norge

VIBRERENDE KLOKKER FOR PERSONER MED SYNSHEMNINGER



METEOR

HTN


Handy Tech Norge
Sporveisgata 10
0354 Oslo

telefon +47 23 25 30 90

post@htn.no
www.htn.no

AVLESING AV TID

- Et lett trykk på knapp H gir antall timer
- Et lett trykk på knapp TM gir antall ti-minutt
- Et lett trykk på knapp M gir antall minutt

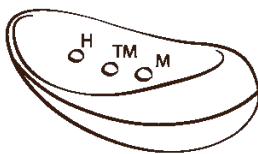

En kort vibrering gir en enhet og en lang vibrering gir 5 enheter.

Eksempel for tidspunktet 11.30:

- Sjekk timer ved å trykke på H knappen, du vil føle to lange vibrasjoner fulgt av en kort (11 timer)
- Sjekk ti-minutt ved å trykke på TM knappen, du vil føle 3 korte vibrasjoner
- Sjekk minutter ved å trykke på M knappen, du vil ikke føle noen vibrasjon

Hver gang du trykker på en knapp, vil tiden forbli uendret i 30 sekunder. På denne måten vil avlesning av alle tre knapper være knyttet til samme tidspunkt.

STILLING AV TID

- Hvis du holder inn H knappen lenger enn vanlig, kan du stille timer
- Hvis du holder inn TM knappen lenger en vanlig, kan du stille ti-minutter
- Hvis du holder inn M knappen lenger en vanlig, kan du stille minutter

Knappene må holdes inne til du kjenner en lang vibrering. Da er du inne i innstillinger. Hver av de korte vibrasjonene som følger, teller en enhet og justerer klokken helt til knappen slippes. Med andre ord justeres tiden kun ved å holde knappene inne. Et eksempel:

- For å stille klokken til 9, holdes time-knappen (H) inne til du føler en lang vibrering fulgt av 9 korte vibreringer. Slipp så knappen.
- For å sette ti-minutter til 0, hold TM knappen inne til du kjenner en lang vibrering, og slipp så knappen.

Det er likegyldig i hvilken rekkefølge du stiller tiden på de tre knappene. Hvis du beveger deg mellom tidssoner, justerer du bare timene.

SPESIFIKASJONER

Mekaniske spesifikasjoner

- Lengde: 79 mm
- Bredde: 39 mm
- Høyde: 19 mm
- Vekt: 27 g
- Vannbestandighet: ned til 10 m
- Temperatur: maks 85°C
- Farge: stabil
- Materiale: ABS resin*

Elektriske spesifikasjoner

- Spenning: 3V (to 1,5V batteri)
- Batteri: levetid fra 2-5 år
- Nøyaktighet: max 0,3s/dag (to minutter pr. år)
- Materiale: Inneholder ikke bly eller andre skadelige substanser
- Resirkulering: Klokken kastes som spesialavfall

*resirkulerbart, behagelig å ta på, utmerkede mekaniske egenskaper.

BYTTE AV BATTERI

1. Fjern skruen bak på Meteor
2. Åpne Meteor ved å skille front- og bakside ved skruen.
3. Skyv batteriene forsiktig ut
4. Erstatt batteriene (Energizer 357 eller tilsvarende)
5. Lukk Meteor

GARANTI

- Klokker fra ALEXANDRAVISION har to års garanti. Garantien dekker alle produksjonsfeil. Den dekker ikke normal slitasje av de materialer den er bygd av, og heller ikke skader som skyldes en unormal bruk. Batterier er heller ikke dekt av garantien.
- Batterienes levetid avhenger av hvordan du bruker klokken (2-5 år). Vær nøye med kun å bruke Energizer 357 batterier eller tilsvarende. Det er en fordel om batteriene skiftes av en profesjonell urmaker.
- Lommeurene er vanntette og flyter i vann. De kan rengjøres med en våt klut. Ikke bruk rengjøringsmidler.